

[LV] Lietošanas instrukcija

Dermatix® Ultra

Lokāli lietojams silikona gels tikko sadzijušu brūču rētu veidošanās novēršanai un izteiktu nenobriedušu rētaudu veidošanās mazināšanai.

Dermatix®
ULTRA

Kas ir Dermatix® Ultra gels?

Dermatix® Ultra ir neredzams, ātri žūstošs gels lokālai lietošanai, kas palīdz uzturēt ādas mitruma līdzsvaru, vienlaikus ārstējot ķirurģisku operāciju, apdegumu un cita veida traumu radītas rētas. Ir pierādīts, ka Dermatix® Ultra izlīdzina, mīkstina un nogludina rētas, atvieglo rētu izraisītās sāpes, niezi un diskomforta sajūtu, kā arī mazina ar rētām saistīto apsārtumu.

Dermatix® Ultra gelam ir viegls sastāvs bez taukvielām un to ir viegli uzziest visām ādas zonām, tostarp arī uz sejas, locītavām un ieloka virsmām. Tas ātri nožūst, veidojot neredzamu pārklājumu, kas ādai ļauj joprojām justies tīrai un zīdainai.

Dermatix® Ultra, kura sastāvā ir izmantoti tie paši pamatpolimēri ar garu ķēdi, kas lokālajos silikona gela aizsargpārklājumos, ir pieejams tūbiņā. Šis cikliskos siloksānus, siloksāna polimērus un C vitamīnu saturošais gels pieejams tūbiņās pa 6 g, 15 g un 60 g.*

Kādam nolūkam lieto Dermatix® Ultra gelu?

Dermatix® Ultra lieto keloīdo un hipertrofisko rētu (piemēram, rētu, kas radušās parasto ķirurģisko procedūru, traumatisku brūču un apdegumu rezultātā) ārstēšanai un profilaksei. Tas ir ideāli piemērots lietošanai tūlīt pēc brūces sadzišanas un ādas virsma paliek līdzena. To var lietot arī aktīvi dzīstošu izteiktu sarkanu nenobriedušu rētu ārstēšanai, bieži pat divus gadus pēc brūces aizvēršanās.

Kā lietot Dermatix® Ultra gelu?

Noņemt tūbiņas korķīti un nogrieziet tūbiņas galu (60 g iepakojumam noņemt folija pārklāju). Nomazgājiet un nosusiniet skarto zonu, jo Dermatix® Ultra atļauts uzklāt tikai uz tīras, sausas ādas. Rētā maigi iemasējiet nelielu daudzumu gela. Lai uz apgērba nepaliktu traipi, ar salveti noslaukiet visu lieko daudzumu. Pēc tam, kad Dermatix® Ultra nožūvis, to var pārklāt ar kosmētisko pūderi. Gels jālieto vismaz divus mēnešus – vienu reizi no rīta, otru reizi vakarā. Tomēr grūti ārstējamu rētu gadījumā var būt nepieciešama turpmāka ārstēšana. Dermatix® Ultra var lietot arī bērniem.

Kad Dermatix® Ultra gelu nav atļauts lietot?

- Dermatix® Ultra nav atļauts lietot uz nesadzijušām atvērtām brūcēm.
- Dermatix® Ultra nav atļauts lietot tā, ka tas saskaras ar gļotādām, vai uzziest pārāk tuvu acīm.
- Bez ārsta ieteikuma Dermatix® Ultra nav atļauts uzziest virs citiem dermatoloģiskajiem līdzekļiem.

Vai Dermatix® Ultra gels var izraisīt kādas nevēlamas blakusparādības?

Retos gadījumos šis gels var izraisīt apsārtumu, sāpes vai ādas kairinājumu. Ja Jūs satrauc šis vai kādas citas nevēlamās blakusparādības, konsultējieties ar savu farmaceitu vai ārstu.

Kā uzglabāt Dermatix® Ultra?

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C, tālu no siltuma avotiem.
- Nelietot pēc derīguma termiņa (📅) beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Sīkāka informācija

Vairāk informācijas par Dermatix® Ultra Jūs varat saņemt no sava farmaceita vai ārsta.

REV 09/2023

* Visās valstīs visi iepakojuma veidi netiek piegādāti



Hanson Medical, Inc., Kingston, WA 98346, USA

OS-096-0
16944



Rottapharm S.p.A., Via Valosa di Sopra, 9 - 20900 Monza, Italy



Mylan Ireland Limited,
Northern Cross, Dublin 17, Ireland



Vietējā pārstāvniecība Baltijas valstīs:

Viātris SIA, Mūkusalas 101, Rīga LV-1004, Latvija



VIATRIS